OPT OMED AURORA®





PIKAOPAS

Aloittaminen



tamalla Optomed Aurora Client ohjelmisto (lisätietoja muistitikulla)

ohjelmisto (lisätietoja muistitikulla)

Käyttöliittymä



Kuvaaminen



1. Liitä optiikkamoduuli ja silmäkuppi



2. Käynnistä kamera



3. Pimennä huone



4. Kuvausasento



5. Asetusten säätäminen



6. Fokusointi (manuaalinen/automaattinen)



7. Valitse diopterin arvo (vain manuaalitilassa)



8. Valitse kirkkaustaso



9. Valitse kohdistuspiste



10. Lähesty pupillia ja aseta silmäkuppi tiukasti tutkittavan silmän ymärille



11. Oikealla kuvausetäisyydellä retina näkyy koko kuva-alalla ilman heijastumia tai varjostumia



12. Paina laukaisinta ottaaksesi kuvan

Kuvaamisen jälkeen

1



Tutustu myyntisalkusta löytyvään muistitikkuun kameran käyttöön ja ohjelmistojen asennukseen liittyen.





R 1.0 2019 09 12